


veterinary technology for life

# Eickemeyer®

[www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)

Telefon 071 788 23 13

## *Endoskopie entdecken*

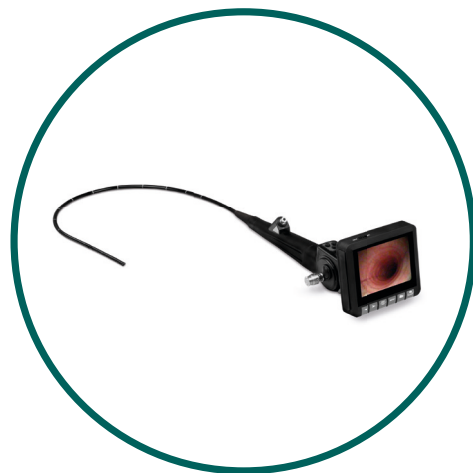

# EICKVIEW SD ENDOSKOPIESYSTEM

## Entdecken Sie die Zukunft der Veterinärmedizin mit dem EickView SD Endoskopiesystem!

Unser hochmodernes Endoskopiesystem bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre diagnostischen Fähigkeiten auf das nächste Level zu heben. Der hochwertige Endoskopiemonitor mit grossem, intuitivem Touchscreen lässt sich nahtlos mit drei vielseitigen „Semi-Disposable“-Endoskopen verbinden. Nutzen Sie die Vorteile der flexiblen Endoskopie in Bereichen wie Gastroskopie, Bronchoskopie und Rhinoskopie, ohne die hohen Investitionen für herkömmliche Videoendoskope tätigen zu müssen. Jedes Endoskop ist mit einem hochauflösenden CMOS-Bildsensor und einer LED-Lichtquelle ausgestattet, die Ihnen kristallklare Bilder liefern. Mit dem EickView SD Endoskopiesystem können Sie präzise Diagnosen stellen und die bestmögliche Versorgung für Ihre tierischen Patienten gewährleisten.

### EickView SD Endoskopiemonitor

- ▶ 15,6" Touchscreen mit 1'920 x 1'080 Full-HD-Auflösung
- ▶ Funktionen: White Balance, Zoom, Freeze, Foto- (JPG), Videoaufnahme (MP4) und DICOM
- ▶ 64 GB Speicherkapazität
- ▶ Netz- und Akkubetrieb, Akkulaufzeit bis zu 5 Std.
- ▶ Ausgänge: HDMI, DVI, SDI und USB
- ▶ Abmessungen (in cm): B 39 x H 25 x T 4
- ▶ Gewicht: 2,7 kg

**307000**

### EickView 150SD

- ▶ Arbeitslänge: 150 cm
- ▶ Ø aussen: 6,0 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 2,8 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 180°
- ▶ Abwinklung rechts / links: 120°

**307010**

### EickView 60SD

- ▶ Arbeitslänge: 60 cm
- ▶ Ø aussen: 3,2 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,2 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 210°

**307020**

### EickView 60SD-XS

- ▶ Arbeitslänge: 60 cm
- ▶ Ø aussen: 2,7 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,2 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 210°

**307030**

### EickView 65SD-URS

- ▶ Arbeitslänge: 65 cm
- ▶ Ø aussen: 2,1 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,2 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 270°

**307040**



## EickView 5-in-1 Endoskopiesystem

Das EickView 5-in-1 Endoskopiesystem ist ein wahres Multitalent für die Tiermedizin. Das einfach zu bedienende, mobile Gerät bietet die Möglichkeit, sowohl mit flexiblen als auch mit starren Endoskopen zu arbeiten. Somit können sämtliche Arten der Endoskopie mit nur einem Grundgerät abgedeckt werden – von der Diagnose bis hin zu chirurgischen Eingriffen.

Das EickView 5-in-1 vereint ein grosses, 15,6" Full-HD-Display, eine leistungsstarke LED-Kaltlichtquelle, den Anschluss für flexible Endoskope der EickView HD-Serie mit einer Luft- und Wasserpumpe sowie die digitale Bilddatenspeicherung per SD-Karte in einem System.

**306200**

## Outdoor Case für EickView 5-in-1

- ▶ Mit Schaumstoffeinlage
- ▶ Aus robustem Plastik

**30620001**

## EickView HD und HD+ Videoendoskope

Die EickView HD und HD+ Videoendoskope liefern brillante Bilder bei der Broncho- und Gastroskopie. Die neuen HD+ Endoskope zeichnen sich durch ihre verringerten Aussendurchmesser bzw. die vergrösserten Arbeitskanäle aus. Durch die Vielzahl an verfügbaren Endoskopgrössen können Untersuchungen vom Kleintier bis zum Pferd durchgeführt werden.

## Technische Daten Endoskope

- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Distalende beinhaltet 1 CMOS-Kamera-Chip, 2 Lichtleiter, Arbeitskanal, Linsenspüldüse
- ▶ Lieferumfang: Drucktester, 2 Reinigungsbürsten, Reinigungsset, Transportkoffer

## EickView 5-in-1 Kamera Kit

Das Kamera Kit sorgt dafür, dass das EickView 5-in-1 Endoskopiesystem auch für starre Endoskope genutzt werden kann.

- ▶ Full-HD-Endoskopkamera
- ▶ C-Mount Zoom-Adapter
- ▶ 3 m Lichtleiterkabel

**306201**



306201



EickView HD Videoendoskope							
Art. Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Ø aussen	Arbeitskanal	Tiefenschärfe	Sichtfeld	Abwinkelungen
<b>306177</b>	EickView 60 HD Endoskop	60 cm	3,5 mm	1,2 mm	3 – 50 mm	120°	oben 160° / unten 130° rechts / links 0°
<b>306178</b>	EickView 100 HD Endoskop	100 cm	6,0 mm	2,0 mm	3 – 50 mm	120°	oben 210° / unten 90° rechts / links 100°
<b>306266</b>	EickView 150-6 HD+ Endoskop	150 cm	6,0 mm	2,8 mm	2 – 100 mm	120°	oben 210° / unten 90° rechts / links 100°
<b>306268</b>	EickView 150-8 HD+ Endoskop	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	3 – 50 mm	120°	oben 210° / unten 90° rechts / links 100°
<b>306270</b>	EickView 350 HD+ Endoskop	350 cm	13,0 mm	3,7 mm	3 – 100 mm	140°	oben 180° / unten 180° rechts / links 160°

# EICKVIEW TRAGBARE LED-VIDEOENDOSKOPE

Die EickView LED-Videoendoskope sind durch ihre äusserst kompakten Dimensionen die perfekte Lösung zur Broncho-, Gastro-, Uretero- und Vaginoskopie bei Hund und Katze sowie zur Untersuchung der oberen Atemwege beim Pferd. Die Geräte arbeiten völlig autark, da die leistungsstarke LED-Lichtquelle und die Kamera direkt im distalen Ende der Endoskope integriert sind. Darüber hinaus ermöglicht der klapp- und drehbare 3,5" Monitor sowohl die direkte Video- und Bildwiedergabe als auch Speicherung per SD-Karte. Ausserdem sind die EickView LED-Videoendoskope an einen separaten Monitor anschliessbar.

### Technische Daten

- ▶ Klappbarer 3,5" Monitor zur Video- und Bildwiedergabe
- ▶ Aufnahme und Archivierung auf SD-Karte
- ▶ Dateiformate: JPG, AVI
- ▶ Integrierte LED-Lichtquelle
- ▶ Akku mit bis zu 3 Stunden Betriebszeit
- ▶ USB-Anschluss und Video-out
- ▶ Tiefenschärfe: 5 – 80 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Blickwinkel: 110°



306166

EickView tragbare LED-Videoendoskope					
Art. Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Ø aussen	Arbeitskanal	Abwinklungen
306009	EickView 60S Endoskop	60 cm	3,3 mm	1,2 mm	nach oben 180° nach unten 130°
306011	EickView 60 Endoskop	60 cm	4,2 mm	1,3 mm	nach oben 180° nach unten 130°
306010	EickView 70 Endoskop	70 cm	6,0 mm	2,0 mm	nach oben 180° nach unten 130°
306166	EickView 100E Endoskop	100 cm	8,0 mm	2,8 mm	nach oben 150° nach unten 130°
306164	EickView 150E Endoskop	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	nach oben 130° nach unten 130°

## ZUBEHÖR EICKVIEW ENDOSKOPE


		EickView 60 / 60S/60 HD / 60SD / 60SD-XS	EickView 70	EickView 100 HD/150 HD	EickView 100E/150E/150L / 150-8 HD+ / 150-6 HD+ / 150SD	EickView 350 HD+
<b>Biopsiezange</b>	Art. Nr.	<b>306311</b>	<b>306314</b>	<b>306318</b>	<b>306316</b>	<b>306315</b>
	Länge (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,3	2,2
<b>Fremdkörperzange</b>	Art. Nr.	<b>306211</b>	<b>306214</b>	<b>306217</b>	<b>306216</b>	<b>306215</b>
	Länge (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,4	2,2
<b>Fremdkörper- greifer</b>	Art. Nr.	<b>306340</b>	<b>306346</b>	<b>306342</b>	<b>306343</b>	<b>306345</b>
	Länge (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,3	2,2
<b>Hakenfasszange</b>	Art. Nr.	<b>306431</b>	<b>306435</b>	<b>306434</b>	<b>306432</b>	<b>306437</b>
	Länge (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,3	2,2
<b>Steinfänger</b>	Art. Nr.	<b>306336</b>	<b>306332</b>	<b>306331</b>	<b>306329</b>	<b>306335</b>
	Länge (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1,0	2,0	2,0	2,3	2,45
	Korbgrösse (mm)	20	20	40	40	50
	Fäden	4	6	6	6	6
<b>Polypektomie- schlinge</b>	Art. Nr.		<b>306426</b>	<b>306422</b>	<b>306423</b>	<b>306421</b>
	Länge (cm)		120	230	230	400
	Ø (mm)		1,8	1,8	2,4	2,45
<b>Zytologiebürste</b>	Art. Nr.	<b>306415</b>	<b>306416</b>	<b>306417</b>	<b>306418</b>	<b>306414</b>
	Länge (cm)	120	160	230	230	400
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,6	2,5
<b>Reinigungsbürste</b>	Art. Nr.	<b>306444</b>	<b>306440</b>	<b>306441</b>	<b>306442</b>	<b>306445</b>
	Länge (cm)	120	160	230	230	400
	Ø (mm)	2,2	3,0	3,0	5,0	7,0
<b>Schlauch zur Schleimproben- entnahme</b>	Art. Nr.	<b>306353</b>	<b>306353</b>	<b>306352</b>	<b>306352</b>	<b>306355</b>
	Länge (cm)	100	100	350	350	400
	Ø (mm)	1,1	1,1	1,8	1,8	2,45



306311




306211

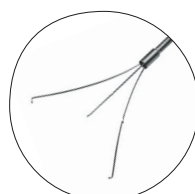


306340



306431

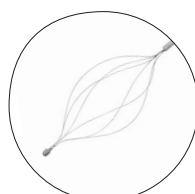


306336

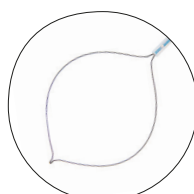


306426



306415

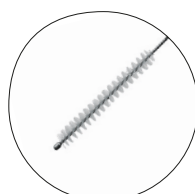

306444

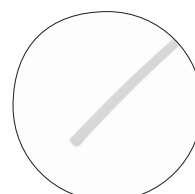

306353




# LAPAROSKOPIE BASIS-SET

Das Laparoskopie Basis-Set bietet Ihnen eine fundierte Grundlage für minimalinvasive Eingriffe. Es ermöglicht schonende Behandlungen in Bereichen wie Nebennieren, Gallenblase, Lunge, Darm, Mediastinum und Fortpflanzungstrakt. Das Set kann problemlos mit spezialisierten Instrumenten und Zubehör erweitert werden, um den individuellen Anforderungen Ihrer Praxis gerecht zu werden. So bleiben Sie flexibel und optimal aufgestellt, um Ihre chirurgischen Eingriffe effizient und präzise durchzuführen.


## Set komplett, bestehend aus:

- ▶ Starres Endoskop, L 32,8 cm, Ø 5 mm, 30° (Art. Nr. 305004)
- ▶ EickView 5-in-1 Endoskopiesystem (Art. Nr. 306200)
- ▶ EickView Kamera Kit (Art. Nr. 306201)
- ▶ Trokarhülse, L 9,5 cm, Ø-Innen 5,5 mm (Art. Nr. 30495000)
- ▶ Sicherheitstrokar, L 16 cm, Ø 5,5 mm (Art. Nr. 30495031)
- ▶ Trokarhülse, L 10,1 cm, Ø-Innen 11 mm (Art. Nr. 30500005)
- ▶ Sicherheitstrokar, L 17,1 cm, Ø 11 mm (Art. Nr. 30495033)
- ▶ Veress-Kanüle, L 10 cm, Ø 2,0 mm (Art. Nr. 3050002)
- ▶ Elektrochirurgiegerät EickTron 160 W
  - Leistung über Fuss- oder Handschalter regulierbar
  - Max. Output: 160 W (schneiden), 100 W (koagulieren), 60 W (bipolar) (Art. Nr. 323135)
- ▶ Bipolares Anschlusskabel (Art. Nr. 323106)
- ▶ Bipolarer Anschlussadapter (Art. Nr. 323139)
- ▶ Bipolare Koagulationsfass- und Schneidezange EickCut, L 32 cm, Ø 5 mm (Art. Nr. 30495013)
- ▶ Klingen für EickCut Zange, 5 Stück (Art. Nr. 30495014)
- ▶ HF-Anschlusskabel für monopolare Instrumente (Art. Nr. 30495050)
- ▶ Monopolare Universal-Fasszange L 36 cm, Ø 5,0 mm (Art. Nr. 30495016)
- ▶ CO<sub>2</sub>-Insufflator
  - Druckbereich: 1 – 30 mmHg
  - Fünf verschiedene Insufflationsmodi (Art. Nr. 305300)
- ▶ Druckminderer für CO<sub>2</sub>-Insufflator (Art. Nr. 30526001)
- ▶ Schiebereduzierung, von Ø 10 mm auf 5,5 mm (Art. Nr. 30500007)


**306040**

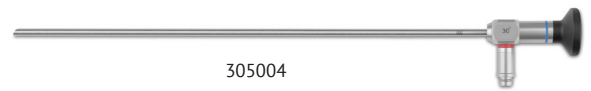

305004

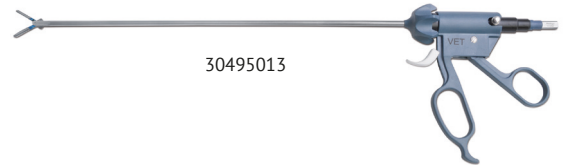

30495013

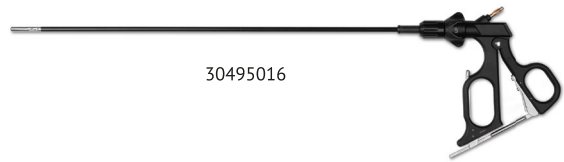

30495016



30495000



30500005




30495031

30495033

3050002



323106

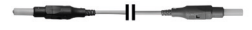

30495050



30495014



323139



30526001



30500007



323135



305300



306200



306201


Tischaufsatz zum einfachen Positionieren, Fixieren und Ausbinden während der Laparoskopie.

- ▶ In Längsachse beidseitig stufenlos kippbar
- ▶ Viele Fixiermöglichkeiten
- ▶ Einfacher Auf- und Abbau
- ▶ Leicht zu reinigen

### EICKEMEYER® Laparoskopie Tischaufsatz für Hunde

- ▶ Länge: 136 cm

**305100**

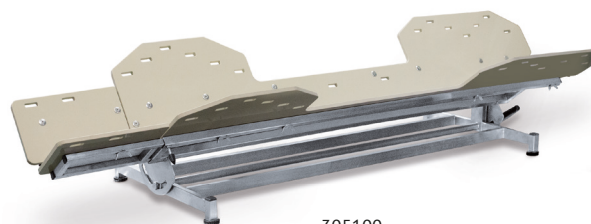

305100

### EICKEMEYER® Laparoskopie Tischaufsatz für Katzen

- ▶ Zusätzlich auch in Querachse stufenlos kippbar
- ▶ Länge: 73 cm

**305110**



305110

## ENDOSKOPIEWÄGEN

### Endoskopiewagen aus Edelstahl

- ▶ 3 höhenverstellbare Einzelböden 54 x 50 cm
- ▶ 1 feste Bodenablage 41 x 57 cm
- ▶ Rand = 15 mm
- ▶ 4 feststellbare Rollen
- ▶ Abmessungen (in cm): H 170 x B 60 x T 60

**306160**



306160

### Endoskopiewagen

- ▶ 4 Ablageböden 60 x 49 cm + 1 Schubfach
- ▶ Rand = 10 mm
- ▶ 2 Energiesäulen zur Stromführung
- ▶ Standardfarbe: weiss / grau
- ▶ 4 leitfähige Doppelrollen
- ▶ Abmessungen (in cm): H 139,5 x B 60 x T 62

**306150**



306150



306155

### EICKEMEYER® Endoskopiewagen

- ▶ 3 höhenverstellbare Einzelböden 54 x 50 cm
- ▶ 1 feste Bodenablage 50 x 54 mm
- ▶ 1 Zusatzboden 30 x 50 mm für LCD-Monitore
- ▶ Standardfarbe: grün / grau
- ▶ 4 feststellbare Rollen
- ▶ Abmessungen (in cm): H 170 x B 60 x T 70

**306155**

## EICKVIEW KOMPAKT ENDOSKOP-SET

Das speziell entwickelte EickView Kompakt Endoskop bietet durch seinen geringen Aussendurchmesser und den integrierten Arbeitskanal die optimale Lösung für die Rhino-, Tracheo- und Vaginoskopie bei Kleintieren. Die neue verschraubbare Otoskopierschutzvorrichtung macht das Endoskop zudem zum idealen Instrument für die Untersuchung des äusseren Gehörgangs und des Trommelfells.

- ▶ Perfekte Verbindung durch homogenes und minimalinvasives Distalende durch Verschmelzung von Arbeitsschaft und Endoskop
- ▶ Höchste Mobilität durch autarke Arbeitsweise der aufschraubbaren LED-Akku-Lichtquelle
- ▶ Keine Schmutzablagerung durch homogenes Distalende
- ▶ Integrierter Arbeitskanal: Ø 1,3 mm
- ▶ Ø aussen: 3,8 mm
- ▶ Arbeitslänge: 14 cm
- ▶ Blickrichtung: 30°
- ▶ Öffnungswinkel: 90° (Weitwinkel)
- ▶ Fremdkörperzange: Ø 1,0 mm, L 25 cm
- ▶ Langlebiger Akku/Ersatz-Akku mit einer Betriebszeit von je 4 Std.
- ▶ 3 verstellbare Lichtstufen
- ▶ Zwei integrierte Spülhähne ermöglichen eine stetige Insufflation und Versorgung mit Spülflüssigkeit
- ▶ 3 verschiedene Anschlüsse: Storz, Wolf, ACMI
- ▶ Okular: DIN-Okular erlaubt reibungslosen Anschluss an alle gängigen C-Mount-Kameras
- ▶ Lieferumfang: Endoskop inkl. verschraubbare Otoskopierschutzvorrichtung, LED-Handlichtquelle, Fremdkörperzange, Ladegerät, Ersatz-Akku, 2 Reinigungsbürsten, Transportkoffer

**306122**



## EICKVIEW ULTRA KOMPAKT ENDOSKOP-SET

Das EickView Ultra Kompakt mit 3 mm Aussendurchmesser bildet die neue Generation von multifunktionellen starren Endoskopen und eignet sich ideal für alle HNO-Anwendungen sowie zur Tracheo- und Vaginoskopie.

- ▶ Homogenes und minimalinvasives Distalende durch Verschmelzung von Arbeitsschaft und Endoskop
- ▶ Keine Schmutzablagerung durch homogenes Distalende
- ▶ Leichter reibungsloser Zugang durch extrem geringen Aussendurchmesser
- ▶ Integrierter Arbeitskanal ermöglicht Fremdkörperextraktionen und Biopsien im Handumdrehen
- ▶ Arbeitskanal Ø: 1,3 mm
- ▶ Ø aussen: 3 mm
- ▶ Arbeitslänge: 11 cm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Öffnungswinkel: 90° (Weitwinkel)
- ▶ Endoskop einlegbar
- ▶ Spülhähne: Zwei integrierte Spülhähne ermöglichen eine stetige Insufflation und Versorgung mit Spülflüssigkeit
- ▶ Lieferumfang: Endoskop, LED-Handlichtquelle, Fremdkörperzange, Ladegerät, Ersatz-Akku, 2 Reinigungsbürsten, Transportkoffer

**306112**

