

veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.ch

Telefon 071 788 23 13

DRAGONFLY

Akku-Bohrmaschine



DRAGONFLY AKKU-BOHRMASCHINE – KOMPONENTEN

Das leistungsstarke und intuitiv bedienbare Motorsystem für die Kleintier-Osteosynthese


Die DRAGONFLY ist ein modulares Akku-Bohrmaschinensystem mit 4 Aufsätzen, die je nach Bedarf zum Schrauben, Fräsen, Bohren und Schneiden verwendet werden können und durch die Schnellkuppelung intraoperativ gewechselt werden können.

Das Handstück besticht durch sein schmales Griffdesign und einen intuitiv bedienbaren Einhandmechanismus. Der AO-Aufsatz, das Schnellspannbohrfutter und das Jacobs-Bohrfutter sind kanuliert. Die Bohrfutter sind mit einem Spannbereich bis 4,0 mm ausgestattet. Diese 3 Aufsätze können im Links- / Rechtslauf und auch im Oszillationsmodus bei Geschwindigkeiten von 0 – 1'350 U/min stufenlos betrieben werden. Komplettiert wird die DRAGONFLY durch Aufsatz Nr. 4: die oszillierende Säge. Sie ist mit einer Leistung von 0 – 14'000 osc/min ausgestattet und ermöglicht es, das Sägeblatt in 5 unterschiedlichen Positionen einzusetzen. Handstück und sowie Aufsätze können autoklaviert werden.

Das Kernstück jedoch ist die herausnehmbare, nicht-autoklavierbare Antriebseinheit: Diese beinhaltet die Steuerelektronik sowie den Li-Ion Akku und ist der Garant für lange Standzeiten und Lebensdauer. Die DRAGONFLY bietet Ihnen eine Performance, die Sie bisher nur von Druckluft- oder kabelelektrischen Systemen kannten. Alle Komponenten werden in Deutschland konstruiert und hergestellt.



199520

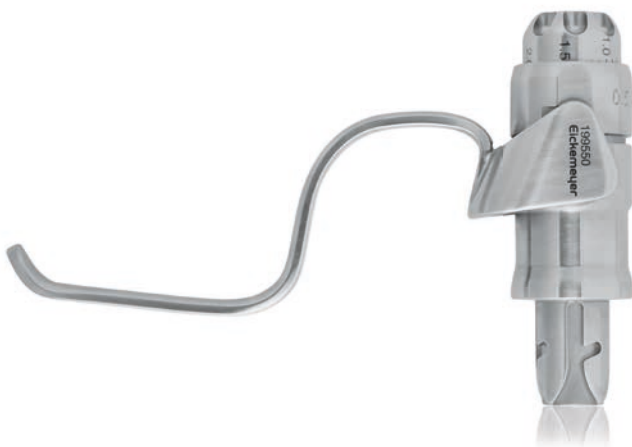

199550



199530



199560



199540

DRAGONFLY AKKU-BOHRMASCHINE – ARTIKELLISTE

DRAGONFLY Akku-Bohrmaschine		
Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
199500	DRAGONFLY Akku-Bohrmaschine, bestehend aus:	
199520	DRAGONFLY Handstück, ohne Aufsätze und Akku	1
199530	DRAGONFLY Jacobs-Bohrfutter-Aufsatz, Spannbereich Ø 0,6 – 2,5 mm	1
199550	DRAGONFLY Schnellspannfutter für KIRSCHNER-Drähte, Spannbereich Ø 0,6 – 2,5 mm	1
199560	DRAGONFLY Schnellspannfutter für AO-Aufsätze	1
199540	DRAGONFLY Aufsatz oszillierende Säge	1
199504	DRAGONFLY Akku-Ladegerät	1
199502	DRAGONFLY Li-Ion Akku	2
E19952001	DRAGONFLY Schlüssel für Jacobs-Bohrfutter-Aufsatz	1
E19953001	DRAGONFLY Schlüssel für Oszillierender Sägeblattaufsatz	1
199503	DRAGONFLY Trichter für Handstück	2
199501	DRAGONFLY Transportkoffer, Abmessungen (in mm): L 400 x B 320 x H 100	1
199541	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 8,5 x B 5,5 x H 0,5	1
199542	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 29,5 x B 7 x H 0,5	1
199543	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 34,5 x B 12 x H 0,4	1
199544	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 35,5 x B 9,5 x H 0,4	1

Optionales Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
199545	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 18,5 x B 7 x H 0,4	1
199546	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 25,5 x B 5,5 x H 0,4	1
199547	Sägeblatt mit Stryker-Aufnahme, Abmessungen (in mm): L 45 x B 13 x H 0,5	1