


veterinary technology for life

# Eickemeyer®

[www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)

Telefon 071 788 23 13

## *Handsäge mit Ringgriff*

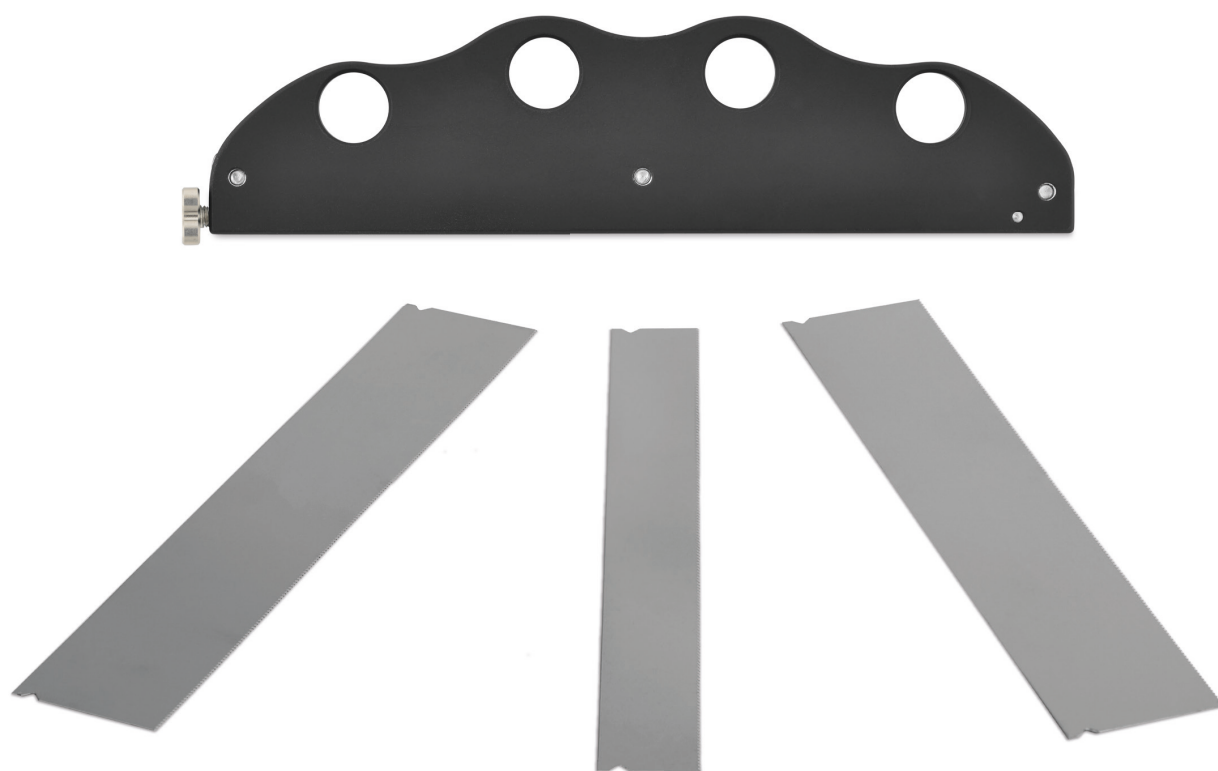

## HANDSÄGE MIT RINGGRIFF – KOMPONENTEN UND EIGENSCHAFTEN

Die Handsäge mit Ringgriff ist ergonomisch geformt und kann mit 3 verschiedenen dicken Sägeblättern bestückt werden. Durch Auf- bzw. Zudrehen der Rändelschraube am Ringgriff, können die rostfreien Sägeblätter eingesetzt, fixiert und entnommen werden.


Die feinen, dünnen Sägeblätter mit 0,2 mm, 0,3 mm und 0,4 mm Dicke ermöglichen ein präzises, handkontrolliertes Sägen. Das Einritzen einer Sägelinie kann bei Knochen von Kleinsthunden und Katzen sinnvoll sein, wenn üblicherweise eine oszillierende Säge verwendet wird. Oszillierende Sägeblätter haben üblicherweise eine Dicke von 0,4 mm – 0,6 mm.

Das Sägen sollte mit mässigem Druck erfolgen. Die Sägezahnspitzen sind so ausgelegt, dass die Säge sich in Schub oder Zug bewegen kann. Alle Sägeblätter haben die gleiche feine Zahnung.

- Lieferung ohne Sägeblätter
- Passende Sägeblätter: Art. Nr. 197341, 197342, 197343
- Rostfrei
- Autoklavierbar



197340

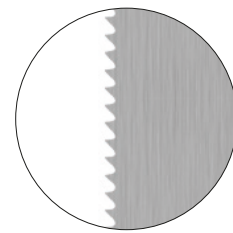

197341



197342



197343

# HANDSÄGE MIT RINGGRIFF – ARTIKELLISTE

Handsäge mit Ringgriff		
Art. Nr.	Bezeichnung	Anzahl
197340	Handsäge mit Ringgriff	1

Optionales Zubehör		
Art. Nr.	Bezeichnung	Anzahl
197341	Sägeblatt für Handsäge mit Ringgriff, 0,2 x 130 mm, Schnitttiefe 18,8 mm, rostfrei, autoklavierbar	5
197342	Sägeblatt für Handsäge mit Ringgriff, 0,3 x 130 mm, Schnitttiefe 8,8 mm, rostfrei, autoklavierbar	5
197343	Sägeblatt für Handsäge mit Ringgriff, 0,4 x 130 mm, Schnitttiefe 18,8 mm, rostfrei, autoklavierbar	5

