

AUTOKLAVEN

Damit sie lange halten.

Im Folgenden sind wichtige Punkte bei der Sterilisation im Autoklaven für Sie zusammengefasst.

1) **Reinigung/Trocknung/Pflege**

Der Sterilisation gehen eine gründliche Reinigung, Trocknung und Pflege voraus.

2) **Kontrolle**

Die Kontrolle nach der Trocknung bildet das A und O im Sterilisationsprozess: Instrumente mit Rückständen und Rost müssen aussortiert und einer erneuten Reinigung bzw. der Entsorgung zugeführt werden. Eine Lupenleuchte (Art. Nr. 614500) kann dabei helfen Rückstände und Rost zu erkennen.

ACHTUNG: Werden Instrumente mit Rückständen oder Korrosion im Autoklaven sterilisiert, können Rückstände/Rost im Autoklaven zurückbleiben und Instrumente in nachfolgenden Sterilisationsvorgängen beschädigen.

3) **Verpackung**

Die Verpackung von Instrumenten schützt sterilisierte Instrumente bei Transport sowie Lagerung und verlängert ihre Lagerzeit. Feuchtigkeit während der Lagerung ist zu vermeiden. Nach Sterilisationsabbruch ist Sterilisiergut unbedingt neu zu verpacken.

Nach der manuellen Reinigung intensiv mit klarem Wasser ausreichend nachspülen. Noch eventuell sichtbare Schmutzreste entfernen. Ideal ist die Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser.

Folgende Sterilbarriersysteme gibt es:

- Sterilcontainer (z.B. Art. Nr. 517050)
- Sterilisationspapier
- Klarsicht-Verpackung (z.B. Art. Nr. 502005 ff.)

Beachten Sie beim Einsatz von Klarsicht-Verpackungen:

- Nur einmalig verwenden
- Maximal zu 75 % befüllen
- 3 cm Abstand zur Siegelnaht und Siegelbreite von mind. 7 mm einhalten, nicht tackern
- Nur auf Peel-Bereich beschriften
- Aufrecht stellen: Papier- an Papier- und Folien- an Folien- seite. Bei liegender Sterilisation: Papierseite nach unten

4) **Beladung**

Positionieren Sie schweres Sterilisiergut unten und achten Sie darauf, dass das Sterilisiergut die Innenwände des Autoklaven nicht berührt. Achten Sie darauf, dass die vom Hersteller angegebene Beladungsmenge beim jeweiligen Sterilisierprogramm nicht überschritten wird.

Die Instrumente sind unmittelbar anschließend vollständig zu trocknen. Dies sollte bevorzugt mit Druckluft geschehen, da diese Methode sich als besonderes schonend und effizient erwiesen hat. Alternativ mit einem fusselfreien, weichen Tuch trocknen. Insbesondere die Zwischenräume und Gelenke sind sorgfältig zu trocknen.

5) **Programmauswahl**

Die Programmauswahl ist abhängig von:

- der Beladungsmenge
- der Risikogruppe des Instrumentes (unkritisch: Nierenschale, semikritisch: Spekula, kritisch: lange Trokare)
- der verfügbaren Zeit bis zum Wiedereinsatz der Instrumente

6) **Kontrollen am Autoklaven**

Täglich

- Bowie und Dick-Test oder Dampfdurchdringungstest mit Kontroll-Set (Art. Nr. 500071)
- Sichtprüfung der Kammer und Türdichtung
- Kontrolle von Strom und Speisewasser
- Kontrolle der Dokumentationsmedien

Wöchentlich

- Vakuumtest (im kalten, trockenen Autoklaven)

Mehr Infos unter www.a-k-i.org, „Grüne Broschüre“.



**GRÜNDLICHE
REINIGUNG
PERFEKTES HYGIENE-
MANAGEMENT**



EICKEMEYER®

GERMANY | EltstraÙe 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | E info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

CANADA | 250 Briarhill Dr. | Stratford | Ont. Canada | N5A 7S2 | T +1 519 273 5558 | F +1 780 963 5428 | E info@eickemeyervet.com | www.eickemeyervet.com

DENMARK | Lysbjergvej 6, Hammelev | 6500 Vojens | Denmark | T +45 7020 5019 | F +45 7353 5019 | E info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

ITALY | Via G. Verdi, 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T +39 085 935 4078 | F +39 085 935 9471 | E info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

NETHERLANDS | Bedrijventerrein, Pavijen-West Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | E info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

POLAND | AL Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T +48 22 185 55 76 | F +48 22 185 59 40 | E info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T +41 71 788 23 13 | F +41 71 788 23 14 | E info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T +44 20 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk